

my  
life

Clickfine®



## Met iedere 'click' het gevoel van veiligheid: de naald zit goed!

- Gepatenteerde universal click®-technologie
- Past op alle gangbare injectiepenen
- Met siliconenlaag voor vrijwel pijnloze injectie
- De hoorbare "click" bevestigt de veilige aanbrenging
- Kleurcodering om naaldlengtes eenvoudig te herkennen



Meer vrijheid. Meer vertrouwen. Met mylife™.

**YPSOMED**  
SELF-CARE SOLUTIONS



## De nieuwe 4.5 mm naald

### Heel eenvoudig, wel zo veilig!

- De kortste Clickfine® pennaald biedt dezelfde zekerheid
- Vermindert naaldangst
- Met siliconenlaag voor vrijwel pijnloze injectie

dhr       mw

Titel/Naam/Voornaam \_\_\_\_\_

Straat/huisnr. \_\_\_\_\_

Postcode/stad \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_

Geboortedatum \_\_\_\_\_

E-mail \_\_\_\_\_

**Toestemming om contact op te nemen via telefoon of Email**

Ik zou graag meer informatie ontvangen over diabetes en uw producten. Voor deze doeleinden verleen ik Ypsomed BV en geassocieerde groepsbedrijven toestemming voor het opnemen, opslaan en verwerken van mijn informatie, in het bijzonder gezondheidsinformatie met betrekking tot mijn behandeling.

Ook ga ik ermee akkoord dat Ypsomed BV en geassocieerde groepsbedrijven mij

via telefoon en       via Email

informatie mogen toezenden over diabetes en nieuwe aan diabetes-vernante producten.  
(Vink alstublieft de velden aan. Dank u)

Ik kan mijn toestemming aan Ypsomed BV voor het gebruik van mijn informatie voor de hierboven genoemde doeleinden op ieder moment en zonder opgave van reden intrekken.


Datum, handtekening \_\_\_\_\_

Postzegel  
niet  
nodig


Ypsomed BV  
Antwoordnummer 13539  
4130 ZX Vianen

## 💡 Eenvoudig vanaf het begin


Kan eenvoudig op alle gangbare injectiepen worden vastgeklit

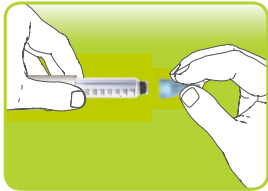

De pennaald vastklikken – veilige aanbrenging is verzekerd door de hoorbare “click”.

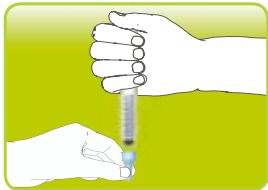

Tip: De pennaald verticaal op een tafel plaatsen en de pen van boven vastklikken.

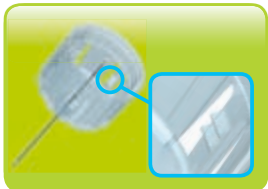

Vijf dubbele grijpertjes voor veilige bevestiging.



Gepatenteerde universal click®-technologie.

## 👤 Kies je juiste naaldlengte

Gebruiksvriendelijke kleurcodering voor eenvoudige herkenning van de juiste naaldlengte

De mylife™ Clickfine®-pennaalden zijn in vijf verschillende lengtes verkrijgbaar:



4.5 mm, 31G/0.25 mm



6 mm, 31G/0.25 mm



8 mm, 31G/0.25 mm



10 mm, 29G/0.33 mm



12 mm, 29G/0.33 mm

## ☂️ Geschikt voor iedereen



Naaldhouder met kijkvensters voor extra optische controle. Met siliconenlaag en drievoudig geslepen facet voor een vrijwel pijnloze injectie.



Gemakkelijk te verwijderen binnenste beschermhuls.




Buitenste beschermhuls met goede grip. Handig lipje voor snelle verwijdering van de verpakingsfolie.


## ⚠️ Click voor iedere injectie

mylife™ Clickfine®-pennaalden zijn steriele producten voor eenmalig gebruik

Plaats voor iedere injectie een nieuwe pennaald om verwondingen of infecties te voorkomen, die door vuile, botte of verstopte pennaalden veroorzaakt kunnen worden.

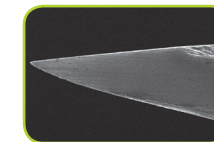

Een nieuwe pennaald

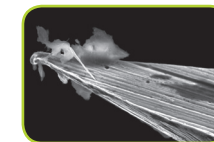

Gebruikte pennaald met weefselresten

## Welke behandelingsvorm gebruikt u?

- Orale diabetesbehandeling (pillen)
- Insulinetherapie met
- 1 – 3 injecties per dag (CT)  
Zo ja, welke insulinepen gebruikt u?

---

- Meer dan 4 injecties per dag (ICT)  
Zo ja, welke insulinepen gebruikt u?

---

- Insulinepomp behandeling (CSII)  
Zo ja, welke insulinepomp gebruikt u?

---

## Welke pennaalden gebruikt u nu?

---

## Ik ontvang graag een proefzakje van de volgende naaldlengte:

- 4.5 mm
- 6 mm
- 8 mm
- 10 mm
- 12 mm



Meer **vrijheid.**  
Meer **vertrouwen.**  
Met **mylife™.**



Bloedglucose-  
meetsystemen



Infusiesystemen



Pen- en veiligheids-  
pennaalden



Accessoires  
en service

**mylife™** biedt u alles wat u nodig heeft voor een eenvoudige en betrouwbare zelfbehandeling, zodat u meer vrijheid en meer vertrouwen heeft om te leven zoals u dat wilt.